


## Pansement compressif CHUT pour les hémorragies externes importantes

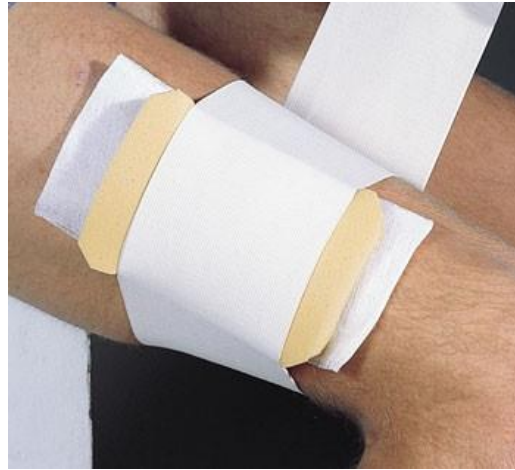

### ➤ Son rôle :

- Sa force de contention et la densité du tampon remplacent le point de compression nécessaire pour toute hémorragie importante (hémorragie externe, artérielle ou veineuse).
- Le pansement compressif CHUT est conçu pour se substituer à la compression manuelle et libérer le secouriste.
- Il absorbe le sang jusqu'à ce qu'il existe un équilibre entre la pression du sang dans les vaisseaux et la pression externe.

### ➤ Sa composition :

- 1 **compresse** de gaze hydrophile.
- 1 **tampon en mousse** spongieux en latex à ph neutre.
- 1 **bande élastique de contention** pour le maintien du pansement.

### ➤ Sa mise en place :

- Sans lâcher la compression manuelle, déchirer l'étui protégeant la compresse stérilisée.
  - Poser la compresse sur la plaie.
    - Appliquer le CHUT sur la compresse.
    - Poser l'extrémité de la bande sur le coussin.
    - Commencer l'enroulement.
    - Tendre la bande plus ou moins fortement suivant l'importance de l'hémorragie.
    - Fixer la bande.